

Ateliers

24/03/23



Connectivité AB



Ateliers
24/03/23



Processeurs

- Naida/Sky CI M 90



- Naida CI Q 90



- CHORUS
(pour implants
C1)



- Harmony



- Neptune



Ateliers
24/03/23



Systeme Roger



Naida CI M 90

(Ou Sky CI M 90)

Roger Direct

=Récepteur Roger X
intégré (mais à acheter
en plus si ce n'est pas
offert)



Naida CI Q 90

Roger 17

Avec Accu Powercel
170 uniquement

(ou Roger X sur le
Compilot I)



• CHORUS

(pour implants C1)

Roger Direct
=Récepteur Roger
intégré

• Neptune:

Roger X



Ateliers
24/03/23



COMPILOT



Naida/Sky CI M 90



• Naida CI Q 90



COMPILOT II


Permet les connexions
bluetooth

COMPILOT I

Permet les connexions
bluetooth



Compatibilité des
gammes Phonak
(décalage)

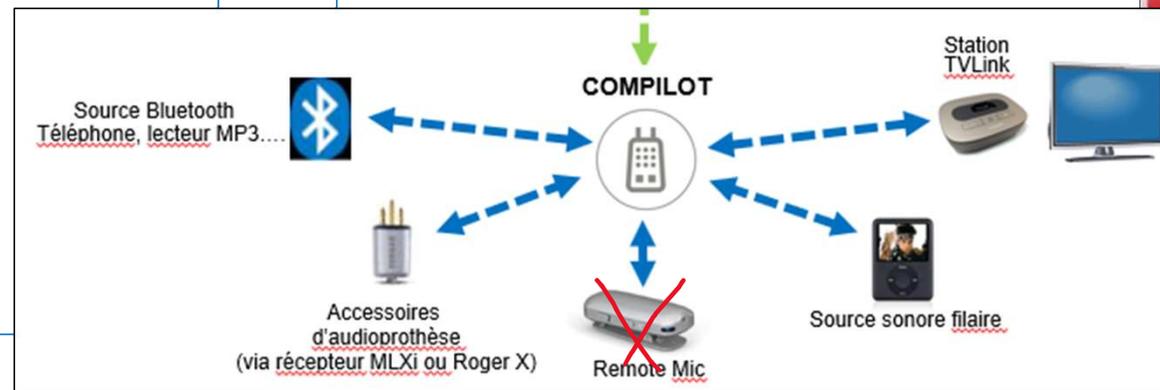

Ateliers

24/03/23



Bluetooth (hors Compilot)

- Naida/Sky CI M 90

Bluetooth intégré

Diffusion bilatérale/bimodale

Marvel brings wireless connectivity to Naida CI M



Un seul processeur à appairer même si bilatéral

- Naida CI Q 90

CI Connect

Avec accu Powercel 170 uniquement

Diffusion unilatérale (sauf tél dual BT)



Ne fonctionne PAS sur
Naida CI Q30/Q70



Ateliers
24/03/23



Bluetooth (hors Compilot)

- Naida/Sky CI M 90

Appairer un seul processeur



Ateliers
24/03/23



Systeme TV



- Naida/Sky CI M 90

- TV connector
(connexion directe)

OU
COMPILOT II
+TV link II



Protocole Phonak AirStream



- Naida CI Q 90

- TV connector
(Avec CI Connect)

OU
COMPILOT I
+TV Link S



Ateliers

24/03/23




Télécommande



Naida/Sky CI M 90

AB Remote App

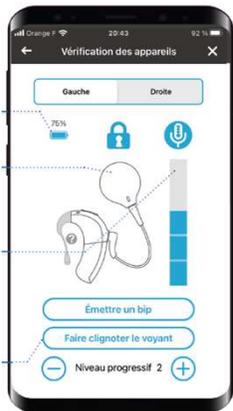

- Naida CI Q 90



COMPILOT I (à programmer
comme télécommande dans le
Sound Wave)

AB Mypilot (non utilisable en cas
d'appairage bimodal et retiré de
la vente actuellement)

Prothèse auditive compatible

Ateliers
24/03/23



- Naida CI Q 90

Phonak

Naida Link UP

Naida Link RIC

Naida Link CROS





- Naida/Sky CI M 90

Phonak

Naida Link M

Sky Link M

(à programmer ensemble ds le
Target CI)

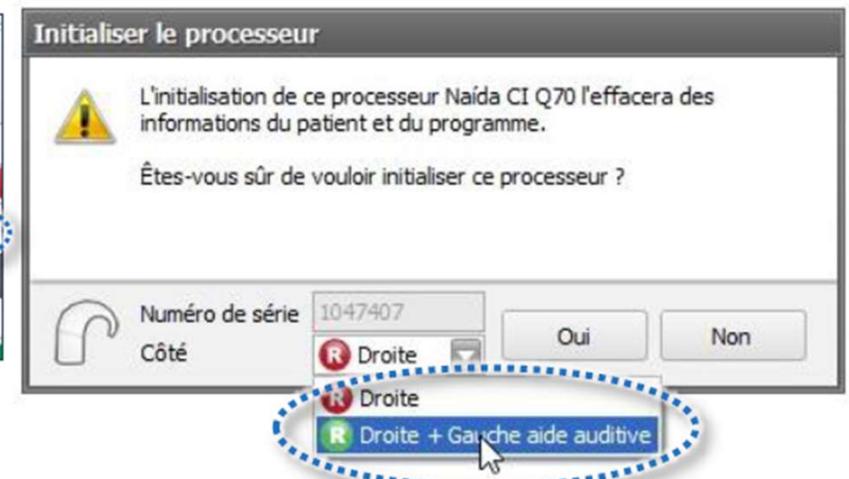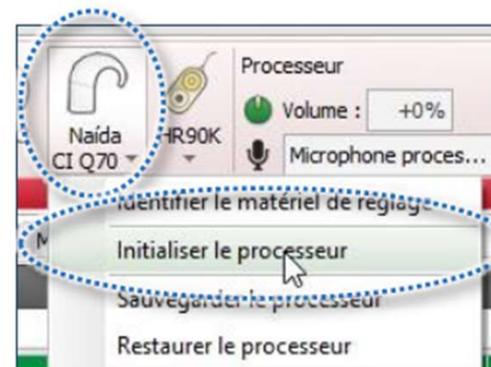

Prothèse à
paramétrer par
l'audioprothésiste
avec le n° donné
par le Soundwave

Prothèse auditive compatible Naida CI Q



Soundwave



Prothèse à paramétrer par l'audioprothésiste avec le n° donné par le Soundwave

Phonak target

Soundwave patient list:

Prénom	Nom	Age
Othmane	AKHROUROUCH	19 annu
Emie	Cannesson	16 annu
GIULIANA	COLOMBO	32 annu
Hell	Defays	11 annu
Quentin	DESTREBECQ	34 annu
C.	G	32 annu
AYDOGDU	Gumac	85 annu
test	julie	9 anné
JP	Kilia	66 annu
JP	Kilia Mputu	66 annu
Jean Pierre	KILYA Mputu	73 annu
Alice	LISBI	33 annu
Bénédict	Loiseau	65 annu
Wabo	Marie Rose	19 annu
salvatore	martello	85 annu
Fabma	MORTSEL	38 annu
KILYA	Mputu	66 annu
Anno-Rosa	MULEKA KAHKOLONG	13 annu
GHARBI NAIMI	Najat	64 annu
Bessie	Ranson	82 annu
Anne-Françoise	SEINHAËVE	54 annu
test	test	15 annu

Patient details for Bessie Ranson:

Sexe : Féminin
 Age : 82 années
 Date de naissance : 23/11/40
 ID appar.: 31293

Phonak Target 8.0.3 interface:

Connecter

Patient [redacted] Appareils Naida Link UP

Aides auditives Paramètres acoustiques Détails Accessoires

Naïda Link UP N° série: 1923

Fonctions binaurales activées Appairage ID 31293

Ateliers

24/03/23



Prothèse auditive compatible Naida/Sky CI M



TARGET CI: pour la
prothèse controlatérale (ce
n'est pas une obligation)

Test de larsen et de l'oreille réelle AudiogramDirect Adaptation basique

FORMULE DE PRÉSÉLECTION

- Phonak Digital Adaptative Bimodal
- DSL [i/o]
- DSL v5a Adulte
- DSL v5a pédiatrique
- NAL-NL1
- NAL-NL2
- NAL-NL 2 Tonal
- Phonak Digital Adaptative
- Phonak Digital Adaptative Bimodal**
- Phonak Digital Adaptative Contrast

Ateliers

24/03/23



Protection pour l'eau

• Naida/Sky CI M 90

Batterie étanche M



Naida CI Q 90



CHORUS

(pour implants C1)



Batterie intégrée
dans le boîtier



Ateliers
24/03/23



LEDS



Naida CI M 90



Demandez le guide!

• Naida CI Q 90



Color	Behavior
Orange	Blinks at start-up
	Solid
	Blinks twice every three seconds
Red	Fades out
	Blinks once per second
	Blinks rapidly (more than once per second)
	Solid
Green	Blinks 5 times
	Flickers in response to loud inputs
	Blinks at start-up, after battery status, and upon program change
	Solid Green
	Blinks 4 times

Demandez le guide!